

# ***TOE CORRECT***

## **Hallux-Valgus-Orthese**

**mit unelastischer Metatarsalbandage  
+ Luftpelotte zur Entlastung der Grundgelenke  
+ wahlweise 4 Zehenschlaufen dig. II - V**

**zur konservativen und postoperativen Behandlung der Zehen  
bei Hallux valgus, Hammerzehen und zur postoperativen Redression**



**Art.Nr. 05200**

**HMV.Nr. 23.01.01.0006**

**mit Zehenschlaufen dig. II - V**

**05200LS links small  
05200LM links medium  
05200LL links large**

**05200RS rechts small  
05200RM rechts medium  
05200RL rechts large**

### **Schuhgröße**

**35 - 37**

**38 - 41**

**42 - 46**

**35 - 37**

**38 - 41**

**42 - 46**

### **Merkmale :**

**Korrektur des Hallux ohne Druckstellen  
durch anpassbare, gepolsterte Aluschiene.  
luftbefüllte Spreizfußpelotte passt sich der Fußhöhlung an,  
hautfreundliches Material, maschinenwaschbar**

## ***TOE CORRECT***

### **Gebrauchsanweisung**

#### **Wichtige Patientenhinweise**

Die ***TOE CORRECT*** ist eine korrigierende und stützende Schienen-Bandage, die nach Anweisung Ihres Arztes getragen werden sollte.

Die Bandage ist zur Verwendung für nur einen Patient vorgesehen.

Verwenden Sie vor dem Anlegen der Bandage keine fetthaltigen Salben, da diese auf Dauer die Luftdurchlässigkeit des Materiales beeinträchtigen können.

Bei auffälligen Veränderungen, die Sie auf das Tragen der Bandage zurückführen, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Garantie wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet.

Bei unsachgemäßer Anwendung und/oder bei Veränderungen die am Produkt unsachgemäß vorgenommen werden ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.

Eine evtl. Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen.

#### **Gegenanzeigen + Risiken**

Mit angelegter Orthese keine gewaltsamen Bewegungen provozieren.

Nehmen Sie die Orthese nach operativen Eingriffen nur nach Weisung des behandelnden Arztes ganz oder zeitweise ab.

Unverträglichkeiten und Hautirritationen sind bisher nicht bekannt. Sollten Sie trotzdem Reaktionen oder Veränderungen der Haut feststellen, die Sie auf das Tragen der Bandage zurückführen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

**Waschempfehlung:** Idealerweise Handwäsche bei 30° C mit einem Feinwaschmittel / Bürste. Lufttrocknung



**Korrektur des Großzehens**



**und der Kleinzehen mittels 4 Schlaufen**



**an der Unterseite befestigen**

hegos GmbH  
Tel: 08192-99733-70

Greifenberger Str. 14 86938 Schondorf  
Fax: 08192-99733-77 e-Mail: [hegos-medical@t-online.de](mailto:hegos-medical@t-online.de)  
[www.hegos-medical.de](http://www.hegos-medical.de)